



Jos tarvitset apua tämän laitteen käytössä, ota yhteyttä Terveystekniikan asiakaspalveluun:
info@terveystekniikka.fi | puh. 030 635 8333

JULKAISUPÄIVÄ: 2022.12.02

VERSIO: v8.2024.01

www.tai-imuri.fi

Täi-imurin käyttö

2

1 Ennen käyttöä	
Käyttöönotto	s. 3
Turvallisuustiedot	s. 4
Yhteenveto	s. 5
Tekniset tiedot	s. 6
2 Aloitus	s. 7
3 Keräyssuodattimen asennus	s. 8
4 Käyttöohjeet	s. 10
5 Latausohjeet	s. 12
6 Laitteen ylläpito	s. 13
7 Hoito-ohjeet	s. 14
8 Tärkeät huomautukset	s. 14
9 Tuotetakuu	s. 15
10 Yhteystiedot ja lisähuomautuksia	s. 16


Johdanto

3

TARKOITETTU KÄYTTÖ: Licetec V-Comb -laitteet on tarkoitettu käytettäväksi täiden ja täimunien poistamiseen hiuksista kertakäyttöisiin suodattimiin, jotka sijaitsevat laitteen sisällä. Tuotetta voidaan käyttää myös täiden havaitsemiseen. Licetec V-Comb -lisätarvikkeet (suodattimet) on suunniteltu keräämään ja vangitsemaan poistettut täit hävittämistä varten.

Pakkauksesi sisältää seuraavat:

- 1x V-Comb A1 -täi-imuriyksikkö
- 1x USB -latauskaapeli
- 4x kertakäyttöinen suodatin
- 1x käyttöohje
- 1x pikaopas
- 1x puhdistusharja

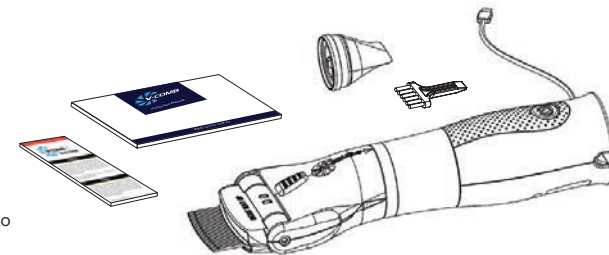

OMINAISUUDET JA EDUT:

- Allergeeniton ja kemikaaliton täiden poisto
- Ladattava ja akkukäyttöinen laite
- Havaitsee ja estää täiden leviämisen
- Pyöristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kampa säädettävillä kampauskulmilla
- LED-valaistu suodatinyksikkö
- Suljetut ja hygieeniset kertakäyttöiset suodattimet
- Tarjoaa välittömästi näkyviä tuloksia



Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempiä käyttöä varten.

VAROITUS! Pienet osat voivat joutua hengitysteihin ja voivat olla vaarallisia. Johto voi pituutensa vuoksi aiheuttaa kuristumis- tai tukehtumisvaaran.


Tärkeitä turvallisuustietoja

4

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohjeet myöhempiä käyttöä varten.

VAROITUS

- Varmista, että virtalähteen sähkötekniset ominaisuudet vastaavat V-Comb A1:n vaatimuksia, ja että virtalähde on täysin toimintakuntoinen.
- Jos laite saa virtaa ulkoisesta lähteestä, sen on oltava kytkettynä luokan II adapteriin tai 5V-virtalähteeseen.
- Täi-imuria voivat käyttää useimmat aikuiset, edellyttäen, että käyttäjä on ymmärtänyt käyttöohjeet.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain hiuksiin, ja sitä voi käyttää sekä sisätiloissa että ulkona kuivissa olosuhteissa.
- Sopii käytettäväksi useimmilla aikuisilla ja yli 3-vuotiailla lapsilla.
- Huomaa, että tätä tuotetta ei tule käyttää lasten tai henkilöiden, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai kokemuksen ja tiedon puute, elleivät he ole valvonnan alaisia.
- Lapset (edes valvonnan alaisena) eivät saa leikkiä laitteella. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Vältä kosketusta silmiin, korviin tai suuhun.
- ÄLÄ KÄYTÄ, JOS IHOLLA ON HAAVOJA.
- Älä upota V-Comb A1 -laitteen runkoa veteen tai muihin nesteisiin.
- Pidä kaikki sähköliitännät puhtaina ja kuivina.
- ON ERITTÄIN SUOSITELTAVAA PUHDISTAA TÄMÄ TUOTE VÄLITTÖMÄSTI KÄYTÖN JÄLKEEN.
- Vältä laitteen pudottamista tai kolhimista.
- Emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai muusta väärinkäytöstä.
- V-Comb A1 ja sen lisätarvikkeet on hävitettävä paikallisten WEEE-määräysten mukaisesti.
- Laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia!
- Älä sijoita täi-imuria paikkaan, jossa se on vaikea irrottaa sähköpistorasiasta.
- Älä käytä tai säilytä laitetta paikassa, joka on alttiina suoralle auringonvalolle, äärimmäselle kuumuudelle tai kylmyydelle, vedelle, nukalle, lemmikkien karvoille, pölylle jne.
- Älä tee laitteeseen muutoksia ilman valmistajan lupaa!
- Varoitus! Jos laitetta muokataan, asianmukaiset tarkastukset ja testaukset on tehtävä, jotta laitteen turvallinen käyttö voidaan taata.
- Varoitus! V-Comb A1 -laitetta ei saa huoltaa käytön aikana.
- Potilaan on tarkoitus käyttää laitetta tämän ohjekirjan mukaisesti.
- Jos täitartunta jatkuu täi-imurin käytön jälkeen, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

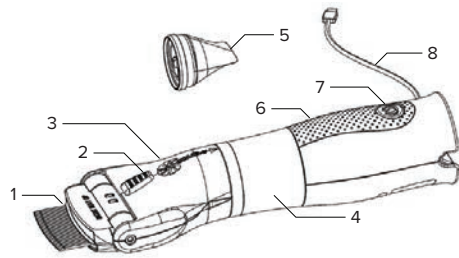**V-Comb A1:n osaluettelo**

1. Pyörästetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kampa
2. Kampauskulman säätönappi
3. Kampauspää
4. LED-valaistu suodatinlokero
5. Suljettu kertakäyttöinen suodatin
6. Päärunko
7. Virtakytkin
8. USB-latauskaapeli



Lue ohjeet ennen täi-imurin käyttöä ja säilytä ne myöhempiä käyttöä varten.

VAROITUS!

Laitteessa tulee käyttää ainoastaan V-Comb A1 -keräyssuodattimia.



Vastaa Australian standardeja



Vastaa lääkinnällisiä laitteita koskevia EU 2017/745 määräyksiä



WEEE – sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys



Älä käytä keräyssuodatinta uudelleen



Sähköiskusuojattu



Mahdollisen vaaran merkintä




Eurooppalainen valtuutettu edustaja

1. Tarkista pakkauksen sisältö.



Lue ohjeet ennen V-Comb A1 -täi-imurin käyttöä ja säilytä ne myöhempiä käyttöä varten.

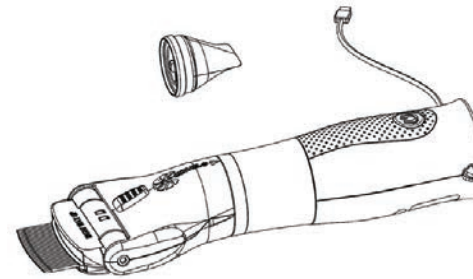

2. Ennen kuin kytket laitteen virtalähteeseen, varmista, että virtalähteen sähköarvot vastaavat V-Comb A1:n arvoja. Odota 10 minuuttia kytkemisen jälkeen ennen laitteen käyttöä.

Vianetsintä

Jos moottori tai LED-merkkivalo ei toimi, kun laite on kytketty päälle, varmista, että laite on täysin ladattu ja virtalähde on oikeellinen.

Huomio: Pakkausmateriaalissa ja laitteessa oleva eränumero viittaa valmistusajankohtaan.

Eränumero: XXXX

X₁ – päivä viikossa

X₂₋₃ – viikko vuodessa

X₄ – vuoden viimeinen numero


Tekniset tiedot

Tuotekuvaus:	Akkukäyttöinen täikampaustaite
Tuotemalli:	TTA101
Sisäinen virransyöttö:	3,7V Li-ion -akku
Ulkoisesti virtalähteellä toimiva:	5V 1,5A tai sitä suurempi virtalähde
Sähköturvallisuus:	Tyypin BF laite (ruostumattomasta teräksestä valmistetut kampaosat)
Pölyn- ja vedenkestävyys:	IP22 (suojattu vierailta esineiltä, jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin 12,5 mm ja tiputtavalta vedeltä, kun kotelo kallistetaan enintään 15°).
EMC-suojaus:	Katso yhteensopivuusosio käyttöohjeen sivulta 16
Käyttölämpötila:	5 °C – 40 °C
Kosteus:	RH 15 % – 93 % (ei kondensaatiota) ei vaadi vesihöyryn osapainetta ≥ 50 hPa
Ilmanpainealue:	700 hPa – 1 060 hPa
Säilytyslämpötila:	–25 °C – +5 °C +5 °C – 35 °C > 35 °C – 70 °C vesihöyryn paineessa jopa 50 hPa
Kosteus:	RH 5 % ≤ 93 % (ei kondensaatiota)
Paino:	Noin 190 grammaa
Laitteen odotettava käyttöikä:	5 vuotta (1 000 tuntia)
Lisävarusteet:	Noin 10 vuotta
Huomautus:	Tämä tuote tulee hävittää paikallisten ja kansallisten WEEE-säädösten mukaisesti elektronisten tuotteiden hävittämiseksi.


V-Comb A1 -keräyssuodattimen asennus

1. Revi auki pakkauksessa oleva keräyssuodattimen kelmu. Kelmu sisältää keräyssuodattimen, joka on tiivistetty hygienian takaamiseksi.


⚠ Keräyssuodattimet on suunniteltu kertakäyttöisiksi. (Vaihtosuodattimia saatavana lisätarvikkeena.)

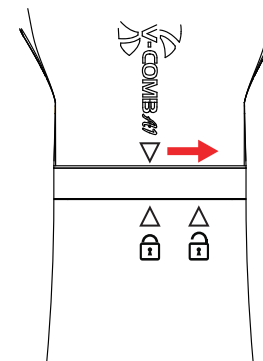

2. Avaa V-Comb A1 -täi-imuri kohdistamalla kampayksikön nuoli pääyksikön "avoin lukko" -symboliin. Laske keräyssuodatin (pyöreä aukko ylöspäin) yksikön läpinäkyvään osaan.

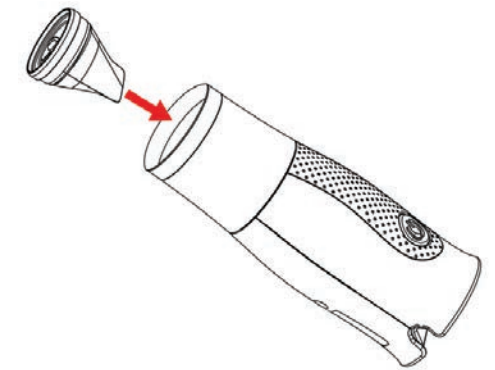


3. Kiinnitä kampauspää huolellisesti yksikön runkoon varmistaen, että et vahingoita tai purista suodatinverkkoa.

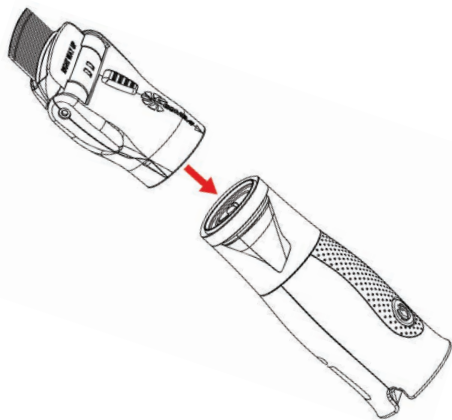


4. Kohdistä kampauspään ohjausnuoli pääyksikön "lukko kiinni" -symboliin kiertämällä, kunnes se lukittuu.


Nyt kampauspää on lukittuna turvallisesti.

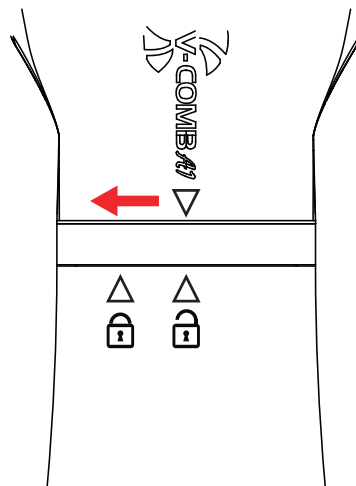

3. Keskity yhteen pieneen osioon kerrallaan (joka ei ole kampaa leveämpi). Kampaa jokainen hiusosio juuresta latvaan varmistaen, että aloitat mahdollisimman läheltä hiuspohjaa.

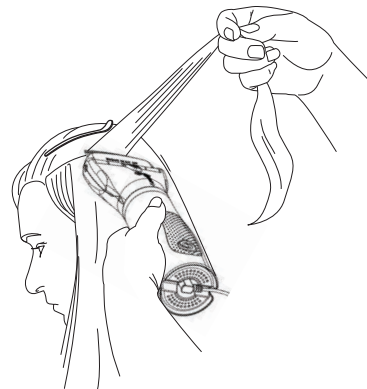


4. Kampaa jokainen hiusosio eri suuntiin (ylös, alas, vasemmalle ja oikealle). Toista tämä jokaisessa osiossa useita kertoja.

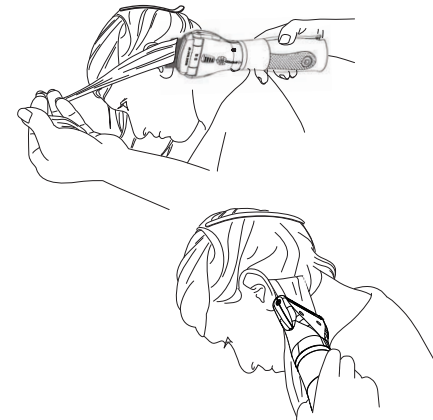


1. Kampakulman muuttaminen: Vedä alas logon yllä oleva sininen liukunappi ja pidä alhaalla säätääksesi kamman kulmaa. Vapauta liukunappi lukitaksesi kamman asento.

Kampaamiseen on kaksi asentoa (suora tai haravoiva) ja yksi asento vain säilytystä varten.

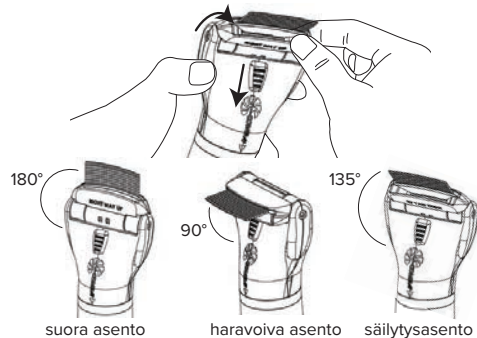

2. Hiuksen valmistelu: Hiuksen tulee olla puhtaat ja kuivat. Harjaa hiukset huolellisesti ennen käsittelyä poistaaksesi mahdolliset takut.

Jaa hiukset osioihin, jotka eivät ole leveämpiä kuin kampa tai paksumpia kuin 1 cm. Käytä hiusklipsejä kiinnittääksesi käsittelemättömät hiukset. Käynnistä laite aloittaaksesi hoidon. Aloita aina niskan tyvestä ja etene ylöspäin, yksi osio kerrallaan, kammaten lopuksi päällelta. Varmista, että pidät kampaa oikein päin.

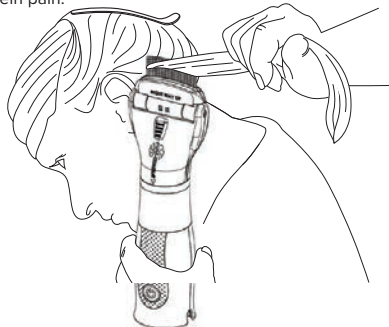


1. Kun laite käynnistetään, virtapainikkeessa syttyy värillinen LED-merkkivalo. Vihreä valo osoittaa, että laitteen akussa on riittävästi virtaa käyttöä varten. Punainen valo tarkoittaa, että laite tarvitsee latausta, ja laite sammuu automaattisesti 1 minuutin kuluttua.

2. Ota pakkauksessa mukana toimitettu latauskaapeli ja yhdistä USB-yhteensopiva pää mihin tahansa yhteensopivaan USB-virtalähteeseen (katso lisätiedot alla). Kytke kaapelin toinen pää laitteen alapuolella olevaan latausporttiin.

Varmista, että kaapeli kulkee yhden v-muotoisen uran läpi, jotta laite voi seistä kunnolla latauksen aikana.


Laitetta voi turvallisesti käyttää, kun se on kytketty virtalähteeseen.

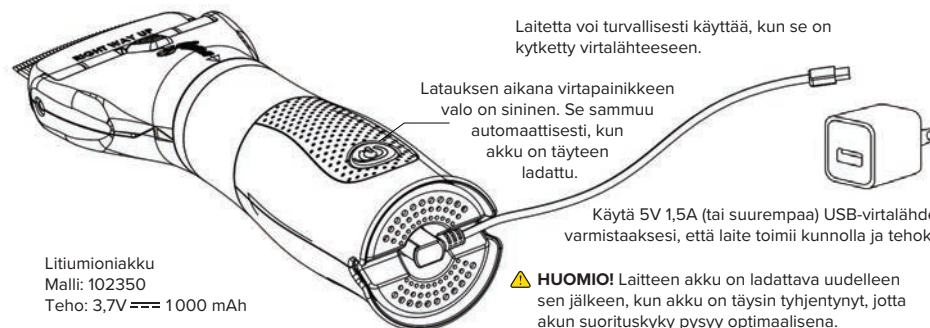

Litiumioniakku
Malli: 102350
Teho: 3,7V --- 1000 mAh


⚠ HUOMIO! Laitteen akku on ladattava uudelleen sen jälkeen, kun akku on täysin tyhjentynyt, jotta akun suorituskyky pysyy optimaalisena.

1. Hoidon jälkeen sammuta laite (irrota virtalähteestä, jos se on kytketty). Irrota kampaosa laitteen rungosta kiertämällä ja kohdistamalla ohjausnuolet lukituksen avauskuvakkeen suuntaan. Kallista laitteen runkoa varovasti roskakorin yläpuolella, kunnes suljettu keräyssuodatin putoaa automaattisesti.

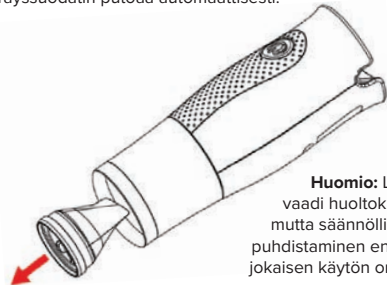

Huomio: Laite ei vaadi huoltokalibrointia, mutta säännöllinen laitteen puhdistaminen ennen ja jälkeen jokaisen käytön on suositeltavaa.

2. Käytä mukana toimitettua harjaa puhdistaaksesi täit ja munat, jotka voivat olla kiinni kamman hampaiden välissä. Täytä kulho tai pesuallas noin 10 cm syväksi kuumalla (EI KIEHUVALLA) hanavedellä ja upota vain kampaosa veteen. **ÄLÄ UPOTA V-COMB A1:N RUNKOA VETEEN. SE VAHINGOITTAÄ LAITETTA.** Poista kampaosa vedestä ja kuivaa huolellisesti. Älä ravista kampaosaa, sillä se voi vahingoittaa venttiiliä.

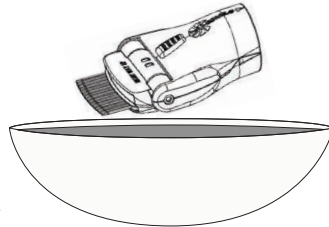

⚠ ÄLÄ KÄYTÄ KIEHUVAA VETTÄ LAITTEEN PUHDISTAMISEEN, KOSKA SE VAHINGOITTAÄ LAITETTA. Ihanteellinen veden lämpötila on 60 °C. Älä liota laitetta yli 5 minuuttia. Varmista, että kampa kuivuu kunnolla ennen säilytystä.

Jatka hiusten kampaamista täi-imurilla päivittäin 1–3 päivän ajan varmistaaksesi, että kaikki täit ja munat on poistettu. Kampaa hiukset vielä 7. päivänä poistaaksesi mahdolliset huomaamatta jääneet munat, juuri kuoriutuneet nymfit tai uudet täit, jotka on voitu saada muilta henkilöiltä.

Jos tartunta jatkuu, hiusten tarkistaminen usein on välttämätöntä, jotta uudelleentartunta voidaan estää. Uudelleentartunnan ehkäisemiseksi suositellaan käyttämään täi-imuria kerran viikossa täiden tarkistamiseksi.

Tärkeä hoitoyhteenveto:

1. Varmista, että hiukset ovat puhtaat ja takuttomat.
2. Jaa hiukset osioihin ja käsittele yksi osio kerrallaan ennen siirtymistä seuraavaan.
3. Pidä hiusosat pieninä (ei leveämpinä kuin kampa) parempien tulosten saavuttamiseksi.
4. Aloita kampaaminen niskan tyvestä ja etene kohti pääläen yläosaa.
5. Kampaa jokainen hiusosio kaikista kulmista useita kertoja.
6. Kampaa perusteellisesti ja säännöllisesti tartunnan aikana. Sennikkyy on avain onnistuneeseen ja tehokkaaseen hoitoon.

Valmistaja tekee kaikkensa varmistaaksensa, että sen tuotteet valmistetaan ilman virheitä. Jos kuitenkin ilmenee valmistus- tai materiaaliavikoja, takaamme tuotteen tai sen osan korjaamisen tai vaihtamisen veloituksetta. Takuu myönnetään vain alkuperäiselle ostajalle ja se on voimassa kaksi vuotta ostopäivästä lähtien, jonka myyntiedustaja on merkinnyt. Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on muokattu, korjattu tai muutoin käsitelty valtuuttamattomien henkilöiden toimesta ja/tai sitä on käytetty vastoin valmistajan ohjeita ja/tai jos tuotetta on käytetty muulla tavoin kuin on kohtuullista tuotteen luonteen huomioiden. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin.

Pyynnöstä voimme toimittaa tarvittavat piirikaaviot ja muut tiedot, jotta pätevä teknikko voi ylläpitää ja korjata joitakin osia tästä laitteesta, jotka valmistaja on nimennyt huoltohenkilökunnan korjattaviksi.

Jos epäilet, että tuotteessasi saattaa olla vikaa, tai jos tuotteen kanssa tapahtuu vakava tapaus, ota yhteyttä Terveystekniikan asiakaspalvelunumeroon 030 635 8333 tai alueesi toimivaltaiseen viranomaiseen ilmoituksen tekemiseksi.

Sinulla on oikeus korvaavaan tuotteeseen tai hyvitykseen, jos kyseessä on merkittävä virhe. Olet myös oikeutettu tuotteen korjauttamiseen tai vaihtamiseen, jos tuote ei vastaa hyväksyttävää laatua.

Säilytä kuitti todisteeksi ostoksesta.

On tärkeää, että V-Comb A1 otetaan käyttöön tämän ohjeistuksen mukaisesti, ja että sitä käytetään vain toimitetussa kokoonpanossa. Langattomat viestintälaitteet, kuten langattomat kotiverkkolaitteet, matkapuhelimet, langattomat puhelimet ja radiopuhelimet sekä niiden tukiasemat, voivat vaikuttaa laitteeseen ja ne on pidettävä riittävän etäällä laitteesta.

Valmistaja



ToLife Technologies Pty Ltd
53 Banksia Road
Welshpool 6106
Western Australia
www.licetec.com.au



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen
Germany

Maahantuoja

Terveystekniikka Oy
puh. 030 635 8333
www.tai-imuri.fi

Suositeltu etäisyys kannettavien ja mobiilien RF-viestintälaitteiden ja V-Comb A1:n välillä			
V-Comb A1 on suunniteltu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilyt RF-häiriöt ovat hallinnassa. V-Comb A1:n asiakas tai käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä pitämällä kannettavien ja mobiilien RF-viestintälaitteiden (lähettimien) ja V-Comb A1:n välillä vähimmäisetäisyyden alla olevan suosituksen mukaisesti, viestintälaitteen enimmäislähtötehon mukaan.			
Lähettimen enimmäislähtöteho	Etäisyys lähettimen taajuuden mukaan (m)		
	150 KHz – 80 MHz d = 1,2 vP	80 MHz – 800 MHz d = 1,2 vP	800 MHz – 2,5 GHz d = 2,3 vP
W			
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23,3
Lähettille, joiden enimmäislähtötehoa ei ole listattu yllä, suositeltu etäisyys d metreissä (m) voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuuteen sovellettavaa yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama suurin lähtöteho watteina (W).			
HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n taajuudella sovelletaan korkeampaa taajuusluettua koskevaa etäisyyttä.			
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettiseen etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastus.			

©2023 ToLife Technologies Pty Ltd. V-Comb® A1 on patentoitu ja suunnittelultaan rekisteröity tuote. V-Comb® on rekisteröity tavaramerkki. Luvaton käyttö ilman lupaa, kuten jakelu, kopiointi, muokkaaminen tai uudelleentulostus, on kielletty.